





Utstyr og bandasjer


Kathrine Rødseth Nerland, sykepleier Boots Apotek HomeCare

Boots
**Home
Care**

TILLEGGSUTSTYR SOM DEKKES PÅ BLÅ RESEPT

Fortykningsmiddel		Legges i stomiposen dersom avføringen er tynn. Unngår «skvulpelyder» og det blir enklere å tømme posen.
Luktfjerning		Kan tømmes i posen og/eller sprøytes i luften for å minske/fjerne lukt.
Barriere krem		Forebygger tørr og sår hud der platen sitter. Ikke nødvendig å bruke dersom huden ser fin ut. Brukes som avtalt med stomisykepleier/sykepleier.
Klebefjerner spray og serviett		Brukes til å fjerne stomiplaten dersom det ikke er hensiktsmessig med kompress og lunkent vann.
Plateforlenger		Kan brukes dersom stomiplaten har en tendens til å løsne i <u>ytterkant</u> . Må ha egen resept, § 5050907
Tetningsringer/stomipasta		Pasta på tube eller en ferdig formet ring av pasta. Finnes i ulike størrelser og tykkelser. Brukes under stomiplaten.
Fikseringsbelte		Kan brukes ved bading og som støtte. Dekkes på blå resept. 2 pr år. Må ha egen resept, § 5050906
Brokkinde		Ved brokk. Dekkes på blå resept. 2 pr år. Må ha egen resept, § 5050901
Fikseringsbind		Støtter og skjuler.
Madrassbeskytter		Kan få på blå resept, § 501

BRUK AV STOMI BAS BROKKBIND

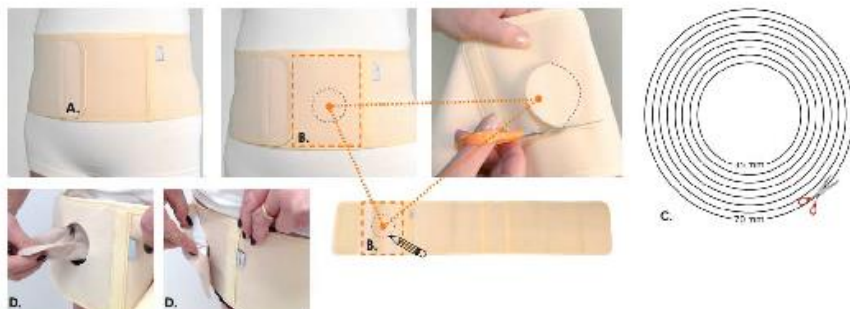

Dette skrevet gjelder de som har fått dette beltet utlevert. Se bort fra det hvis det ikke gjelder deg.

1. Velg riktig størrelse og sett beltet på plass. Fest borrelåsen på siden (A). Juster så det føles behagelig. Beltet skal ikke sitte for stramt.
2. Stomi Bas er spesielt tilpasset for å lage hull for stomibandasje. Hullet skal klippes i det uelastiske materialet (B). Bruk gjerne en mal (C) og marker størrelse og plassering med en penn. Obs! Klipp ikke hullet for stort, platen/posen skal overlape hullet.
3. Tre posen gjennom hullet (D).








Indikasjoner: Brukes som stomibelte. Ved postoperativ pleie. Egnert ved ulike typer av mindre brokk. For å avlaste sår samt ved tidlig mobilisering av pasienten.

Kontraindikasjoner: inneklemt brokk.

Vaskeinstruksjoner: Maskinvask ved 40°. Kan vaskes opptil 90° (levetiden på borrelås blir kortere ved høyere temperaturer). Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Refusjon på blå resept, 2 beller pr år.

PRODUKTER SOM IKKE DEKKES PÅ BLÅ RESEPT

Avfallsposer		<p>Nappysacks 100 stk i en liten pakke. Posene er utviklet spesielt for å unngå vond lukt og de er laget av nedbrytbar plast.</p> <p>Kr 39,-</p>
Badeskjørt med bukse		<p>Se flere modeller på sporty-living.dk</p> <p>Kr. 449,-</p>
Badeskjørt uten bukse		<p>Kr. 249,-</p>
Badedrakt		<p>Badedrakt med lomme til stomiposen.</p> <p>Kr 799,-</p>
Badebukse		<p>Badebukse som er høy i livet og som har lomme til stomiposen.</p> <p>Kr 549,-</p>
Skjold (protector)		<p>Slivt skjold som beskytter mot trykk og slag. Kan brukes sammen med matte.</p> <p>Kr 299,-</p>
Matte til skjold		<p>Matte til å feste skjold på. Festes rundt stomiplaten / -posen.</p> <p>Kr 499,-</p>
Resorb original Gem		<p>Væskeerstatning som gjenoppretter kroppens salt- og væskebalanse. Brukes ved løs avføring, oppkast, varmt klima eller andre fysiske påkjenninger som kan medføre væsketap og dehydrering.</p>

ANTALLSBEGRENSNINGER:

- *Fra 1. januar 2020 ble det lagt inn noen nye antallsbegrensninger.*
- *20 kleberfjerner i spray per utlevering og inntil 80 per kalenderår*
- *250 plateforlengere per utlevering og inntil 1000 per kalenderår*
- *20 stomibelter per kalenderår*
- *10 belter til fiksering per kalenderår*
- *2 belter til kompresjon per kalenderår*
- *400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser per kalenderår*

RESEPT PÅ SYKEPLEIEARTIKLER

Når du bestiller varer hos oss, og vi gir beskjed om at du trenger nye resepter, kan det være nyttig for deg å ha denne oversikten slik at du kan hake av hvilke resepter du har behov for, og ta arket med til legen.

Resept tekst	Ref.kode	Ønsker
Forbruksmateriell ved inkontinens	501	
Forbruksmateriell ved inkontinens - Analirrigasjon-komplett	5010504	
Forbruksmateriell ved urinretensjon (Kateter)	502	
Tappekateter med pose, hydrofile	5020105	
Forbruksmateriell ved stomi	505	
<i>Hjelpemateriell som må rekvireres spesielt av lege:</i>		
- Brokkinde	5050901	
- Fikseringsbelter	5050906	
- Hudfilm	5050902	
- Plateforlenger	5050907	
- Spesielle produkter (Alginatbandasjer mm)	5050904	
Forbruksmateriell til strupeopererte	503	
Forbruksmateriell til diabetes	504	
Hoftebeskyttere	510	
Forbruksmateriell til måling og administrasjon av legemidler	514	
Næringsmidler diverse tilstander	601	
Næringsmidler kreft / immunsvikt	604	
Søke vedtak på næringsmidler hos HELFO	Eget skjema	


Våre fagområder




STOMI



ERNÆRING

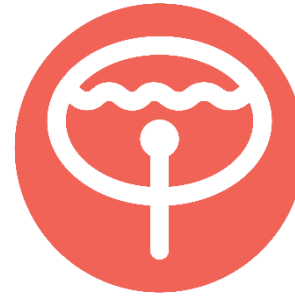

KATETER

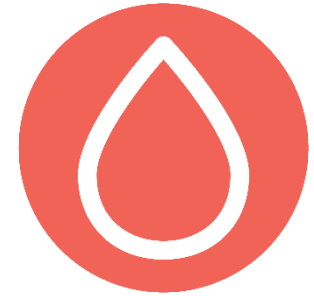

INKONTINENS



SÅR



DIABETES



KOMPRESJON



LEGEMIDLER

Hvem er vi

- Enkel bestilling – telefon, mail eller snart på nett
- Sykepleiere med høy faglig kompetanse
- Personlig oppfølging
- Hjemlevering av varer
- Stort lagerført sortiment – rask levering til deg!
- Apotek + bandasjist
- Mulighet for fast levering

Boots

HomeCare