

Nytt prøvetakingsutstyr til undersøkelse mhp *Chlamydia trachomatis/Neisseria gonore/Mycoplasma genitalium*

Det er lansert et nytt prøvetakingskit for undersøkelse av Chlamydia/Gonore/Mycoplasma. **cobas PCR Female Swab Sample Kit** erstattes nå av **cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit**. Det nye kitet inneholder 2 prøvepensler, A og B (se figur under).

Endocervikal prøvetakning:

Pensel A brukes til å fjerne slim fra cervix før prøvetaking. Kast deretter penselen.


Pensel B benyttes til selve prøvetakingen fra den endocervicale kanal.

Plasser pensel B i transport røret PCR Media Tube for transport til laboratoriet.

Vaginal prøvetakning:

Bruk kun pensel A ved prøvetakning (pensel B kastes).

Plasser pensel A i transport røret PCR Media Tube for transport til laboratoriet.

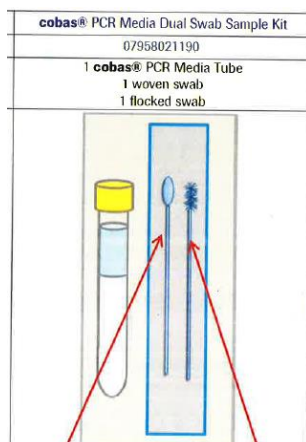

Se vår brukerhåndbok på www.helse-mr.no/mikro for detaljert instruksjon av prøvetakning.

Pensel A – vevet hode.

Brukes til å fjerne slim ved endocervikal prøvetakning.
Brukes som prøvetakningspinne ved vaginal prøvetakning.

Pensel B – børstehode.

Brukes som prøvetakningspinne ved endocervikal prøvetakning.

Prøvetakningssett for urinprøver er uendret.

Alle prøvesett bestilles gratis hos oss på www.helse-mr.no/mikro

Med vennlig hilsen

Solvor Fuglestad
Driftsbioingeniør AMM
Stedfortreder for avdelingssjef
e-post: solvor.fuglestad@helse-mr.no