


## Prosedyre for prøvesending med «ekspres over natt», oppdatert 1.mai 18

### Pakking av prøver som skal sendes laboratoriene i Helse Møre og Romsdal

- Prøvene pakkes i hylser som vanlig.
- Prøvene og rekvisisjonene legges i ufrankerte konvolutter. Konvoluttene kan bestilles fra sykehuset sammen med andre gratisartikler.
- Prøver til medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi samles i ulike konvolutter.
- De ufrankerte konvoluttene samles så i samlepose.
- Alle prøver som skal til Helse Møre og Romsdal sendes samlet til nærmeste laboratorium (Kristiansund, Molde, Ålesund). Vi videresender prøvene innad i foretaket.

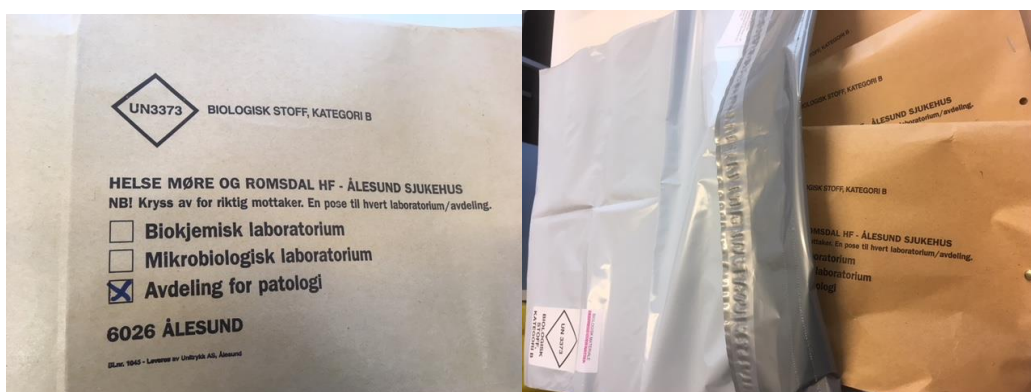

- Samleposen **SKAL** merkes UN 3373 biologisk stoff, kategori B:




Samleposen til Ålesund merkes:  
Avdeling for medisinsk biokjemi  
Helse Møre og Romsdal  
6017 Ålesund

Samleposen til Molde merkes:  
Avdeling for medisinsk biokjemi  
Helse Møre og Romsdal  
6407 Molde

Samleposen til Kristiansund merkes:  
Avdeling for medisinsk biokjemi  
Helse Møre og Romsdal  
6504 Kristiansund

- Samlepakken/esken kan veie opptil 4 kilo. Minimumstørrelsen på pakken er 23x13 cm.
- **Sørg for at du har bestilt fraktetiketter fra laboratoriet på forhånd.** Sjekk at det står riktig til og fra adresse på etiketten.
- Lim en fraktetikett på samleposen.
- Se eksempel:

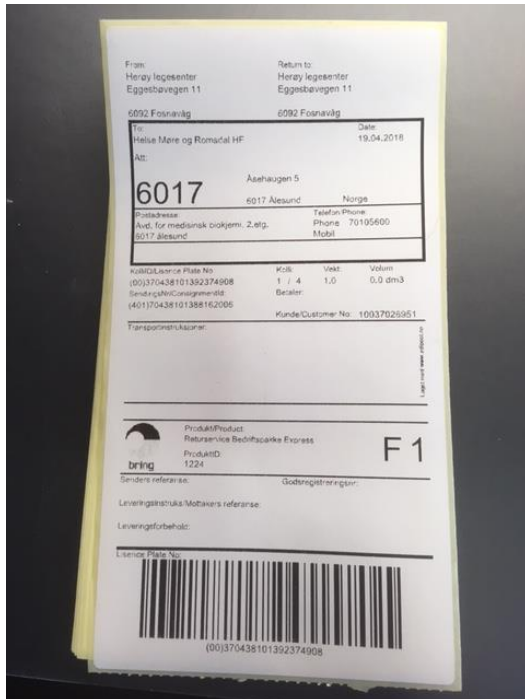

- Prøvene leveres Post i butikk innen oppgitt frist.
- Dersom det er nødvendig å sende prøver på fredager skal det benyttes **egen fraktetikett** for levering lørdager. Denne er merket **L1**. Vi ber om at kun nødvendige prøver sendes med lørdagslevering, da vi betaler ekstra frakt for levering lørdag.
- Prøver som kan oppbevares til mandag oppbevares kjølig til mandag og sendes da.

Klinikk for diagnostikk, Helse Møre og Romsdal HF  
01.05.18