



Prøvetakningsprosedyre for urinprøve fra menn og kvinner

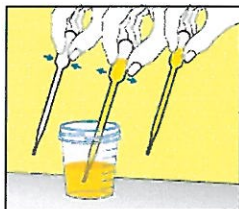


- **Pipetter:** Overfør førstestråleurin til cobas® PCR Media-røret ved hjelp av den medfølgende engangspipetten.

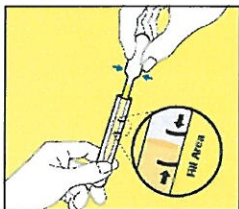

- **Overfør:** Korrekt volum urin er overført når væsknivået er mellom de to svarte linjene som er avmerket på røret.

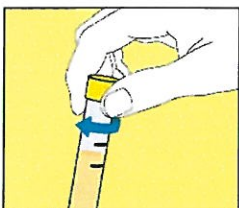


- **Kork:** Skru godt igjen korken på røret.

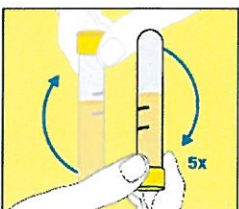

- **Bland:** Vend tuben 5 ganger for å blande urinen og transportmediet. Prøven er nå klar til transport.


Viktig!!

- Kvinner skal ikke vaske "labialområdet" før prøvetakning
- Urinen bør ha stått i blæren minst 1 time før prøvetakning
- Vis forsiktighet for å unngå søl av innhold

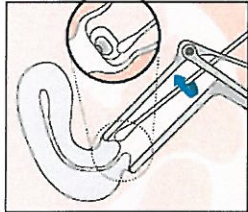


Prøvetakningsprosedyre for cervixprøve fra kvinner


• **Vask:** Bruk en av de medfølgende pinnene til å fjerne slim fra mormunnen og omkringliggende slimhinner. Kast pinnen.

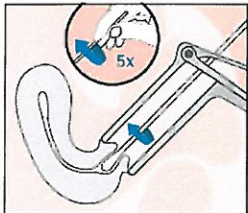

• **Ta prøven:** Før den andre medfølgende pinnen inn i cervix-kanalen. Roter pinnen forsiktig 5 ganger i en retning og ta den deretter ut uten å komme i kontakt med slimhinnene i vagina.

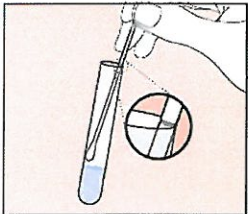

• **Tilpass pinnen:** Fjern korken fra cobas® PCR Media-røret og putt pinnen ned i røret til den synlige mørke linjen på pinnen er på linje med kanten av røret.

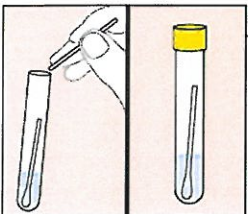

• **Knekk og kork:** Knekk forsiktig av pinnen mot kanten av røret. Skru godt igjen korken. Prøven er nå klar til transport.


Viktig!!

- Prøvetakningspinnen må ikke våtes før prøvetakningen
- Vis forsiktighet for å unngå søl av innhold




Prøvetakningsprosedyre for selv tatt vaginalprøve fra kvinner


Posisjon: Bruk kun den ene av de medfølgende pinnene til prøvetakning – den andre kastes. Hold pinnen i den ene hånda og bruk den andre hånda til å separere kjønnsleppene.

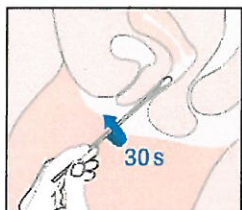


Ta prøven: Før pinnen ca. 5 cm inn i vagina. Roter pinnen forsiktig i ca. 30 sekunder mot "veggen" i vagina. Ta pinnen forsiktig ut. Unngå at pinnen kommer borti noen overflater før den puttes i transportrøret.

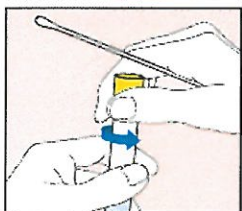

Åpne transportrøret: Hold pinnen i samme hånd som åpner korken på transportrøret, som vist på bildet.

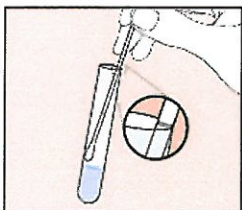

Tilpass pinnen: Putt pinnen ned i cobas® PCR Media-røret til den synlige mørke linjen på pinnen er på linje med kanten av røret (spissen av pinnen skal da være rett over væsknivået i røret).

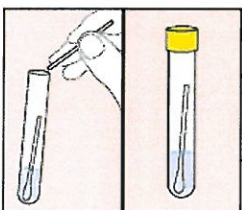

Knekk pinnen: Knekk forsiktig av pinnen mot kanten av røret. Kast resten av pinnen.

Lukk transportrøret: Skru godt igjen transportrøret og returner prøven til rekvirenten.

Viktig!!

Transportmediet kan forårsake irritasjon hvis det kommer i kontakt med hud eller andre kroppsdeler. Behandle transportrøret med forsiktighet.

- Prøvetakningspinnen må ikke vetes med transportmediet eller annen væske før prøvetakningen
- Vis forsiktighet for å unngå søl av innhold