

## Informasjon 09/2014

### Endring fra 1. november angående dyppekultur/ «uricult»

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Molde og Ålesund vil ikke lenger ta i mot dyppekultur/ «uricult» for dyrkning av urinprøver f.o.m 1.11.2014.

Vi ber om at alle prøver til bakteriologisk dyrkning av urin sendes på beholder med borsyre. Urinprøver uten tilsetning kan brukes ved meget kort transporttid (<2 timer etter prøvetaking).

Det er ønskelig at alle rekvirenter går over til forsendelse på beholder med borsyre så raskt som mulig og i god tid før 1.11.14.

Dyrkning av urinprøver gir bedre kvalitet sammenlignet med prøver fra dyppekultur. Dyppekultur (uricult) er en screeningmetode til bruk på ikke-gravide kvinner med ukomplisert, sporadisk, nedre UVI (blærekatarr). Testen er således ikke beregnet for andre pasientgrupper (inneliggende, sykehjemspasienter, pasienter med komplisert UVI, pyelonefritt, urosepsis, barn, menn mm).

Det er enkel overføring fra uringlass til beholder med borsyre.

Det er viktig at glasset fylles helt opp for å oppnå riktig borsyrekonsentrasjon. Se vedlagt bruksanvisning.

Beholder med borsyre fås tilsendt gratis fra våre laboratorium og kan bestilles via vår hjemmeside [www.helse-mr.no/mikro](http://www.helse-mr.no/mikro) eller på telefon 711 22110 (Molde) 70105074 (Ålesund).

Molde, 1. oktober 2014

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen  
Medisinsk fagleg rådgivar

Merete Hagbø  
Avdelingssjef

Solvor Solgaard  
Seksjonsleiar, Seksjon Ålesund  
E-mail: [solvor.solgaard@helse-mr.no](mailto:solvor.solgaard@helse-mr.no)  
Telefonnr.: 70 10 50 57

Signe Linda Håseth  
Seksjonsleiar, Seksjon Molde  
E-mail: [signe.linda.haseth@helse-mr.no](mailto:signe.linda.haseth@helse-mr.no)  
Telefonnr.: 71 12 21 17

## BRUKERVEILEDNING

### URIN OVERFØRINGSSENHET



Overføringsenhet




Vakuurrør m/konisk bunn,  
med eller uten borsyre



Vakuurrør m/rund bunn,  
med eller uten borsyre



**1** Bland urinen godt og overfør den til vakuurrøret så snart som mulig etter prøvetaking. Senk det hvite røret på overføringsenheten ned i urinen.

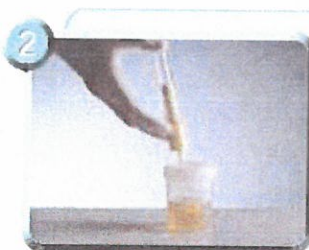

**2** Sett vakuurrøret ned i den gule enden av overføringsenheten og trykk det ned slik at korken på røret perforeres av nålen i overføringsenheten og urinen suges inn i røret.



**3** Trekk vakuurrøret ut av overføringsenheten når det er fylt med riktig mengde (når det ikke er mer vakuum igjen i røret).



**4** Dersom vakuurrøret inneholder borsyre (for mikrobiologiske undersøkelser), må urin og borsyre blandes ved å vende vakuurrøret opp-ned minimum 5 ganger.