

Til våre rekvirentar

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Ålesund, vil frå juli 2014 sende ut Urin-Monovette med borsyre. Borsyra gir stabilt bakterietal inntil 48 timar etter prøvetaking. Prøve skal lagrast i kjøleskap fram til sending.

Dei nye røra må fyllast heilt opp for å få rett konsentrasjon av borsyre. Vend røret 5 ggr etter fylling.

Dei nye røra ser slik ut: altså **GRØNE** i staden for gule. Røra skal fyllast på same måten som urin Monovette utan borsyre. Husk å bruke transporthylse? ved sending (også i koffertposten).



OBS! Andre urin-undersøkelser til avdeling for medisinsk mikrobiologi av tuberkulose (TBC) og Chlamydia må framleis takast i rør utan tilsetning.

Urinprøver til stix, mikro og kjemiske undersøkelser ved avdeling for **medisinsk biokjemi** skal tas på og leveres til laboratoriet i beger eller steril beholder (universalcontainer 20 ml) **uten tilsetning!**

Dersom det går meir enn 48 timar før prøva kjem fram til laboratoriet, må urin dyppekultur (Uricult) brukast.

Venleg helsing

Einar Vik
Medisinskfagleg rådgivar
Avd. for medisinsk mikrobiologi

Solvor Solgaard
Seksjonsleiar
Avd. for medisinsk mikrobiologi
Seksjon Ålesund